



IN CASO D'INCENDIO:

1. Premere il pulsante di sgancio elettrico "*main switch*"
2. Portare il paziente fuori dalla sala RM e/o dal sito
3. Dare l'allerta secondo il "Piano Emergenza Incendi" e utilizzare gli estintori amagnetici per limitare i danni



IN CASO DI QUENCH CON PERDITA DI ELIO GASSOSO IN SALA RM:

1. Accertarsi dell'avvenuto avvio in automatico della ventilazione di emergenza e, in caso negativo o comunque in situazione di dubbio, provvedere all'attivazione manuale
2. Portare il paziente fuori dalla sala esami e/o dal sito RM
3. Dare l'allerta e aprire tutte le porte per diluire l'elio presente nell'aria del locale, aiutandone l'evacuazione



IN CASO DI INTRODUZIONE DI MATERIALE FERROMAGNETICO CHE INTERESSA IL PAZIENTE:

1. Valutazione del coinvolgimento del paziente
2. Se colpito direttamente **rimanendo schiacciato** ➡ premere il pulsante "*quench pilotato*"
3. Se colpito direttamente non rimanendo schiacciato verificare lo stato di incolumità del paziente:
 - Se il paziente è in pericolo di vita e si è impossibilitati a liberarlo ➡ premere il pulsante "*quench pilotato*"
 - Se il paziente non è in pericolo di vita ➡ sospendere l'esame e far uscire il paziente dalla sala RM

