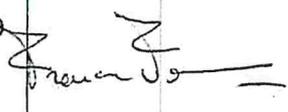


| | | |
|--|--|---|
|  SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL Rieti | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |

UOSD PEDIATRIA E NEONATOLOGIA

| PROPOSTO | FIRMA | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|--|--|
| Responsabile UOSD Pediatria e Neonatologia Dott.ssa F. Faraoni |  | U.O.C. Risk Management, Qualità dei Processi e Auditing | Direzione Sanitaria Aziendale |
| Direttore f.f. UOC DMO Dott. M. Angelucci |  | UOS Governo Clinico e Sistema Qualità Dott.ssa Antonella Stefania Morgante | Dott. Angelo Barbato  |
| Direttore DAPS Dott.ssa A. Barsacchi |  |  | |
| <i>Il presente documento è destinato esclusivamente all'utilizzo interno aziendale. Per eventuali necessità di utilizzo anche parziale da parte di terzi è necessario richiedere formale autorizzazione alla Direzione Sanitaria della ASL Rieti.</i> | | | |

Gruppo di Lavoro:

Responsabile UOSD Pediatria e Neonatologia – Dott.ssa F. Faraoni
 Coord. Inf. UOSD Pediatria e Neonatologia – Dott.ssa E. Santarelli
 UOS Igiene e Profilassi Ospedaliera – Dott.ssa R. De Mari – Infermiera ICA
 Coord. Ostetrica UOC Ostetricia/Ginecologia – Dott.ssa S. De Sisto
 I.O. Assistenza Ostetrica Ospedale – Territorio e Percorso Nascita – Dott.ssa F. Ciferri
 Staff UOC Risk Management, Qualità dei Processi e Auditing – Dott.ssa C. Graziani

STATO DELLE REVISIONI

| DATA | REVISIONE | MOTIVO DEL CAMBIAMENTO |
|------------|-----------|-------------------------|
| 30/08/2018 | 0 | Stesura documento |
| 07/08/2024 | 1 | Aggiornamento documento |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
|  | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |
| | | Pag. 2 di 10 |

INDICE

| | |
|--|---|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. SCOPO..... | 3 |
| 3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI | 3 |
| 4. MODALITA' OPERATIVE | 3 |
| 4.1 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE..... | 3 |
| 4.2 PRODOTTI E DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E NON TERMICHE..... | 6 |
| 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE PERIODICA E/O TERMINALE DELLE TERMOCULLE..... | 6 |
| 6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ | 8 |
| 7. MODALITA' DI MONITORAGGIO..... | 8 |
| 8. DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTO | 8 |
| 9. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO | 9 |

ALLEGATO 1: SCHEDA DI SANIFICAZIONE/MANUTENZIONE

| | | |
|---|---|--|
|  | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |
| | | Pag. 3 di 10 |

1. PREMESSA

Le norme di seguito riportate si riferiscono alla pulizia e alla disinfezione delle cullette e delle culle termiche in uso presso la UOC Pediatria e Neonatologia e il blocco parto del P.O. di Rieti.

Le culle termiche rappresentano l'ambiente all'interno del quale il neonato, con indicazioni cliniche particolari, trascorre un periodo post-natale più o meno lungo, garantiscono allo stesso il comfort necessario al suo benessere fornendogli calore e umidità costanti e l'opportunità di essere accudito e sorvegliato. Esse rappresentano un potenziale serbatoio di infezione per il calore fornito, l'alta umidità, la presenza del neonato e degli operatori che con le loro mani possono contaminare gli spazi interni della culla.

2. SCOPO

Lo scopo della presente Istruzione Operativa è quello di aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari sul rischio infettivo, uniformare corretti comportamenti, garantire un ambiente sicuro e controllato per il neonato in condizioni fisiologiche o patologiche e garantire al contempo la sicurezza degli operatori durante l'esecuzione delle procedure di sanificazione.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente documento è destinato agli operatori sanitari che effettuano la sanificazione quotidiana, periodica e/o terminale delle culle termiche e non termiche

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE

L'istruzione operativa prevede la pulizia quotidiana, la pulizia e la disinfezione periodica e/o terminale.

Controllo prima di ogni utilizzo

Norme di carattere generale:

- osservare le corrette norme igieniche da parte degli operatori addetti;
- utilizzare gli idonei DPI;
- utilizzare appropriate soluzioni detergenti/disinfettanti;
- rispettare le corrette diluizioni dei disinfettanti, del tempo di azione, del risciacquo e dell'asciugatura come da indicazioni della ditta produttrice;
- utilizzare i panni monouso;
- registrare sulla modulistica predisposta per ogni termoculla numerata gli estremi dell'avvenuta detersione e disinfezione, segnalando la data e il nominativo di chi effettua l'operazione;
- procedere allo spolvero con panno monouso della culla prima dell'utilizzo.

L'avvenuta procedura di pulizia e disinfezione delle termoculle viene registrata su una apposita scheda datata e firmata dall'operatore che effettua l'intervento; la conservazione e l'archivio delle schede sono a cura del Coordinatore Infermieristico.

| | | |
|---|---|--|
|  <small>SISTEMA SANITARIO REGIONALE</small> | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |

PULIZIA QUOTIDIANA

- La pulizia quotidiana riguarda la superficie esterna delle culle termiche e l'interno e l'esterno delle culle non termiche.
- La frequenza deve essere quotidiana in genere durante il turno di mattina e comunque in caso di necessità.
- La pulizia quotidiana deve essere effettuata dal personale di supporto in collaborazione con il personale infermieristico per le indicazioni del caso.
- Prima di iniziare la pulizia di una incubatrice o di un lettino occorre: effettuare il lavaggio sociale delle mani e indossare i guanti monouso.
- La pulizia viene effettuata con soluzione detergente/disinfettante attualmente in dotazione e panni monouso, successivamente risciacquata e asciugata.
- I panni monouso devono essere eliminati come rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
- In caso di sporco visibile (tracce di latte, liquidi biologici etc) questo viene rimosso con la soluzione detergente/disinfettante e panno monouso, e successivo risciacquo ed asciugo.

Per le culle e termoculle occupate il cambio biancheria viene effettuato quotidianamente, in caso di culle vuote la biancheria piana viene posizionata quando utilizzata.

| | | |
|---|--|--|
|  SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |

PULIZIA E DISINFEZIONE PERIODICA E/O TERMINALE

Le operazioni vanno eseguite:

- Alla dimissione del neonato.
- A rotazione, ogni 30 giorni durante il turno di pomeriggio.
- Ogni 7 giorni in caso di culla e/o termoculla occupata dallo stesso neonato.
- In seguito ad operazioni di manutenzione o riparazione.
- La pulizia e disinfezione periodica deve essere eseguita dal personale infermieristico e di supporto per le culle termiche e dal personale di supporto o infermieristico per le culle non termiche.
- Le culle termiche e i lettini vanno smontati in tutte le loro parti; la pulizia inizia dalle parti più interne procedendo verso l'esterno, e dalle parti più alte verso le parti più basse.
- Modulo di Umidificazione culla termica: si effettua il ricambio dell'acqua e la pulizia/disinfezione delle componenti su segnalazione visiva e nel caso di procedura periodica/terminale.

Le culle termiche che stazionano in Sala Parto e servono al trasporto del neonato dal Blocco Parto al Nido e viceversa, devono essere sanificate prima e dopo il trasporto del neonato, con le stesse modalità di cui sopra, rigorosamente prima di OGNI utilizzo, le ruote delle culle termiche devono essere sanificate prima dell'ingresso nell'area neonatale e prima del rientro presso il Blocco Parto.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI</p> | <p>REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</p> |  |
| | <p>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE</p> | <p>Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024</p> |

4.2 PRODOTTI E DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E NON TERMICHE

Occorrente per la pulizia e la disinfezione delle culle termiche e non termiche:

- guanti monouso;
- panno monouso;
- GIOSEPT FOAM, soluzione disinfettante e detergente attualmente in dotazione in Azienda, pronta all'uso, spettro di azione: battericida, fungicida, virucida, micobatterica, priva di ingredienti con carattere irritante e/o sensibilizzante, indicata per la pulizia e disinfezione di piani di lavoro, lettini, termoculle, termometri, maschere facciali, ecc. presenta un'ampia compatibilita' con tutti i materiali di costruzione
- Se il prodotto viene a contatto con le membrane mucose risciacquare e lasciare asciugare.
- Il prodotto va conservato nella confezione originale sigillata a temperatura ambiente, a riparo da fonti di calore, in luogo asciutto e pulito.
- Una volta aperto il prodotto va comunque tenuto chiuso correttamente segnalando la data di apertura

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE PERIODICA E/O TERMINALE TERMOCULLE

1. lavaggio sociale delle mani;
2. indossare guanti camice monouso;
3. procedere allo smontaggio delle componenti delle culle termiche;
4. spegnimento della culla termica scollegandola dalla presa di alimentazione e dai raccordi;
5. rimozione della biancheria;
6. rimozione guanti e lavaggio delle mani;
7. indossare guanti monouso puliti;
8. distribuire la soluzione detergente/disinfettante per mezzo dei panni monouso sulle superfici della termoculla iniziando dalle parti interne verso le parti più esterne e dall'alto in basso (tempo minimo di contatto 5 minuti);
9. risciacquare con panno umido e acqua potabile;
10. lasciare asciugare.

Procedere allo smontaggio delle parti componenti e a detersione/ disinfezione delle stesse:

COMPONENTI DELLA CAMPANA

- guarnizioni oblò – vie di accesso introduzione tubi;
- modulo sensore estrarre il modulo e pulirlo con panno inumidito di soluzione detergente/disinfettante e asciugare;
- pannelli parete interna e campana;


| | | |
|--|---|--|
|  SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |

PIANO DI APPOGGIO MATERASSINO E PARTI SOTTOSTANTI

- estrarre il piano di appoggio detergere disinfettare risciacquare asciugare;
- copertura ventola;
- camera di condizionamento;
- modulo umidificazione;
- display/pannello di controllo, piano supporto inferiore e ruote.

Sostituire guanti per estrarre il modulo di umidificazione: svuotare il contenitore dell'acqua pulire disinfettare e asciugare

ATTENZIONE: L'IGIENE DELLE MANI

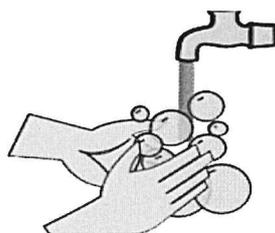

Come noto le mani del personale sanitario sono il veicolo più frequentemente implicato nella trasmissione di patogeni correlata all'assistenza. L'igiene delle mani deve infatti essere ripetuta nel corso dell'assistenza a uno stesso paziente per indicazioni diverse (ad esempio prima del contatto nel passaggio da un sito corporeo a un altro, dopo avere toccato le superfici in vicinanza del paziente). L'antisepsi delle mani con frizione può essere utilizzata senza alcuna controindicazione negli adulti e anche per l'assistenza al neonato. E' importante però rispettare i tempi di contatto e per trattare i neonati attendere l'asciugatura completa delle mani prima di introdurre nell'incubatrice per evitare la diffusione di alcool nell'abitacolo.

| | | |
|--|---|--|
|  SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |

6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

| ATTIVITA' | Coord. Inf.UO Ped/Neon. | Dirigenti medici Ped/Neon. | Infermieri e operatori di supporto | UOS Igiene e Prof. Osp + DMO | DAPS |
|---|--|----------------------------------|--|------------------------------------|------|
| Monitoraggio corretto funzionamento culle termiche | R (per gli ambiti di competenza) | C | R (per gli ambiti di competenza) | | |
| Detersione e Disinfezione delle culle termiche | I | | R | | |
| Formazione continua del personale | R | C | C | C | C |
| Corretta tenuta della scheda di lavoro | R | | C | | |
| Interventi di bonifica ambientale/ controlli microbiologici in caso di cluster o epidemia | C | C | C | R | C |

Legenda: R: Responsabile C: Coinvolto I: Informato R*: Responsabili per gli aspetti di rispettiva competenza

7. MODALITA' DI MONITORAGGIO

n° schede di registrazione correttamente compilate/n° totale schede annualmente previste = 100%

8. DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTO

Il presente documento è pubblicato sull'intranet aziendale. Apposita comunicazione viene inviata da parte della segreteria Risk Management a tutti i Direttori/Responsabili UU.OO./Coordinatori/Posizioni Organizzative coinvolti per la diffusione a tutti gli operatori interessati, con richiesta di presa visione della stessa mediante raccolta delle firme attraverso il modulo "lista di distribuzione".

Copia di tale modulo firmato, il cui originale che andrà conservato presso la U.O. a cura del Coordinatore/Coordinatrice, deve essere trasmesso alla segreteria della U.O.C. Risk Management, Qualità dei Processi e Auditing.

I Referenti e i Facilitatori del Rischio Clinico provvederanno alla formazione del personale sul presente documento, unitamente alla Responsabile e alla Coordinatrice della UOSD Pediatria e Neonatologia.

| | | |
|---|---|--|
|  <small>SISTEMA SANITARIO REGIONALE</small> | REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI |  |
| | ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CORRETTA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE CULLE TERMICHE E DELLE CULLE NON TERMICHE | Cod. IO/110/3/2024 Rev. 1 Del 07/08/2024 |

9. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO

L'aggiornamento del documento deve avvenire con periodicità stabilita (un anno, tre anni, ecc) e sarà aggiornata anche in base a nuove prove di efficacia emerse in letteratura, e/o ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica e ad eventuali nuovi riferimenti legislativi. L'aggiornamento è cura del GdL.

